



Sorelex

TISZTÍTÓ HATÁS ÉS IRÁNYÍTOTT GYÓGYULÁST



OKTENIDIN
ÉS
HIALURONSAV

SORELEX TISZTÍT ÉS IRÁNYÍTJA A GYÓGYULÁST

A Sorelex hatékonyan alakítja ki a sebgyógyuláshoz szükséges optimális környezetet, hozzájárul a sebgyógyulási folyamatok beindításához és támogatja az érképződést.

KORDÁBAN TARTJA A FERTŐZÉSEKET, NEDVSZÍVÓ, TISZTÍTÓ HATÁS
CSÖKKENTI A NAGY MENNYISÉGŰ SEBVÁLADÉKOT
SZÖVETKÉPZŐDÉST INDUKÁL

AZ AKTÍV ÖSSZETEVŐK SZINERGIÁJA

A különleges, természetes eredetű, regeneráló hatású összetevő és a biztonságos, hatékony, antiszeptikus hatóanyag kombinációja gyors és látványos eredményeket ér el.

	SEBKÉPZŐDÉS ELŐKÉSZÍTÉSE	SZÖVETREGENERÁCIÓ
OKTENIDIN	Biztonságosan tisztítja a sebet Hatékony Gram + és Gram - baktériumok ellen Nincs bakteriális rezisztencia	Véd a sebfertőzések kialakulásától Nem gátolja a sebgyógyulást A bőr sejteire nem toxikus, hegmentes gyógyulás
HIALURONSAV	Szabályozza a gyulladáshoz vezető folyamatokat Beindítja a regenerációs folyamatot Serkenti a gyógyulási folyamatokat	Serkenti a keratinociták és fibroblasztok életképességét és migrációját Fokozza az érképződést Szabályozza a kollagén szintézisét
LÁTHATÓ HATÁS	A sebalap gyorsan feltisztul A nedvedzés és a kellemetlen szag csökken Granulációs szövet alakul ki	Gyorsan kialakul az új granulációs szövet Megkezdődik az epitelizáció Csökken a hegeképződés

KOMPLIKÁLT SEBEK KEZELÉSÉRE


A Sorelex a sebek széles spektrumának kezelésére nyújt megoldást. Különösen előnyös, amikor a sebalap gyors tisztítására vagy a gyógyulási folyamatok megindítására van szükség. Használata közepes vagy sok nedvet termelő sebek esetén javasolt.

FERTŐZÖTT, LEPEDÉKES SEBEK

FERTŐZÉS KOCKÁZATÁNAK KITETT SEBEK

KRÓNIKUS, NEMGYÓGYULÓ SEBEK

KIFINOMULT TERVEZÉS

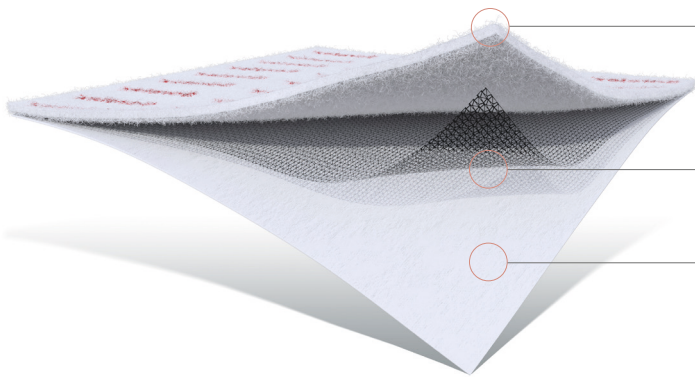

ÁTERESZTŐ RÉTEG

Felszívja és továbbítja a felesleges sebváladékot a másodlagos kötésbe. Megakadályozza a sebkörnyéki bőr macerációját. A réteget vörös mintázat jelzi. A sebfelszíntől távol kell elhelyezni.

TISZTÍTÓ RÉTEG

Elszívja a sebváladékot, ami így a kötécserénél eltávolításra kerül.

AKTÍV RÉTEG

Oktenidin és hialuronsav különleges kombinációja, ami antimikrobiális és biológiai hatással is rendelkezik. A sebbel érintkezve gélt képez. A sebfelszínen alkalmazandó.

BIZTONSÁGOS GYÓGYULÁS

A Sorexel sebfedő aktív hatóanyagai teljesen biztonságosak, hosszútávú használat mellett sem rendelkeznek ismert mellékhatással.

Biztonságosságának köszönhetően a Sorelex rizikó csoportokban is alkalmazható (gyerekek, várandós és szoptató nők, cukorbeteg, allergiás páciensek).

MEGKÖNNYÍTI A MUNKÁT

KÖNNYEN HASZNÁLHATÓ

A hialuronsav kíméletes adhéziója megkönnyíti a sebfedő felhelyezését. Nem igényel pozicionálást a kötéscserék alatt

MÉRETRE VÁGHATÓ

A Sorelex a seb méretéhez és formájához igazítható

RITKÁBB KÖTÉSCSERE

A seb állapotától és a kezelési igénytől függően a Sorelex sebfedőt elégséges kettő-öt naponta cserélni. Javasolt a másodlagos kötést a sebváladék mennyiségétől függően cserélni.



Gyártó:

Contipro a.s. / Cseh Köztársaság

+420 465 519 530

sales@contipro.com

www.hyaluronanhealing.com



h y p p o l a b o r

Forgalmazó:

Hyppo Labor Kft.

+36 20 924-8612

hyppolabor@hyppolabor.hu

www.hyppolabor.hu