

i-STAT® MÉRÉSI FOLYAMATA

POINT OF CARE



- 1 KAPCSOLJA BE AZ i-STAT-OT**
- > új mérés indításához nyomja meg a 2-es gombot
- 2 KÉSZÍTSE ELŐ A KAZETTÁT**
- olvassa be az operátor, a páciens és a kazetta azonosítót
- 3 ÓVATOSAN KEVERJE ÖSSZE A MINTÁT KÖZVETLENÜL AZELŐTT, HOGY FELTÖLTENÉ A KAZETTÁT**
- távolítsa el az első két cseppet (kivéve ha a mintát ujjbegyből vagy kapillárisból vette)
- 4 TÖLTSE MEG A KAZETTÁT A JELZÉSIG**
- lásd: alább
- 5 ZÁRJA BE A KAZETTÁT**
- a kazettát az oldalainál fogja meg
- a kazetta szenzorait ne érintse meg
- bizonyosodjon meg róla, hogy megfelelően zárta be a kazettát; egy kattantást kell hallania
- 6 HELYEZZE BE A MEGTÖLTÖTT KAZETTÁT A KÉSZÜLÉKBE**
- helyezze az analizátort vízszintes, stabil felületre a mérés elkezdéséhez
- **NE** mozgassa el, amíg a vizsgálat be nem fejeződött

A KAZETTA FELTÖLTÉSÉNEK HELYES MÓDJA



Jelen útmutató egy általános betekintést nyújt az *i-STAT* vizsgálati folyamatába. Az *i-STAT* termékekért és a felhasználói dokumentumokért látogasson el és regisztráljon a www.pointofcare.abbott weboldalra.

Kizárólag *in vitro* diagnosztikai használatra.
i-STAT Vizsgálati Folyamat Áttekintése-1024.REV1 03/18
Tisztítása az intézmény követelménynek megfelelően.

i-STAT Az Abbott Group of Companies bejegyzett márkaneve különböző joghatóságokban.