

SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal

Gyors útmutató betegeknek

Ez az útmutató a **SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal** használatához nyújt segítséget. A teszt használata előtt mindenképpen olvassa el a betegeknek szóló használati útmutatót.

IVD

CE

1 Előkészítés a tesztre

- Gondosan olvassa át a **SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal** betegeknek szóló használati útmutatóját.
- A teszt elvégzése előtt mosson kezet szappanos vízzel vagy használjon kézfertőtlenítőt.






Fontos biztonsági információk

Figyelem!


- A teszt elvégzése előtt és után mosson kezet szappanos vízzel vagy használjon kézfertőtlenítőt.
- Ügyeljen rá, hogy a vattapárna tiszta maradjon. Ne érintse a vattapárnát semmihez a használat előtt, és ne is érjen hozzá.
- A tesztkészletet csak egyszer használja.
- Kerülje az érintkezést a bőrrel és a szemekkel. Ha véletlenül mégis hozzá ér, a bőrirritáció elkerülése érdekében öblítse bő vízzel. Ha aggodalma van, forduljon orvoshoz. Kiömlés esetén gondoskodjon a megfelelő fertőtlenítőszerrel történő átfogó tisztításról.
- A készletben található vattapálcát kivételével ne használja a testen a teszt egyéb összetevőit. Ne nyelje le az összetevőket.

A tesztkészlet tartalma


1-es tasak a teszteszközzel és a szárítócsomaggal (5 db)

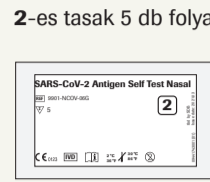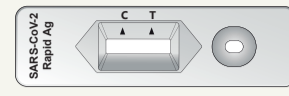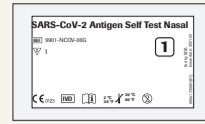

Steril vattapálcá

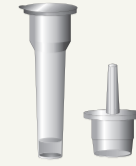



Csőtartó

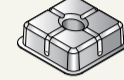

Szükséges, de nem mellékelt anyagok:





- Időmérő
- Papírsebkendő

- Ellenőrizze a fóliatasakok hátoldalán a lejárat dátumot. Ne használja a tesztet a lejárat dátum után.
- Nyissa fel az egyik 1-es fóliatasakat: tépje fel a jelölt vonal mentén. Vegye ki a teszteszközt és a szárítócsomagot.
- Ellenőrizze a teszteszköz épségét, és hogy a szárítócsomagban nincsenek-e zöld gyöngyök. Ne nyissa fel a szárítócsomagot.

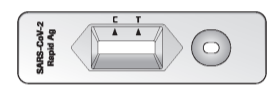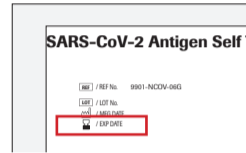

2 Orrgarati minta vétele és előkészítése


- Nyissa fel a 2-es fóliatasakat: tépje fel a jelölt vonal mentén. Vegye ki az egyik folyadékot tartalmazó csövet és egy csővéggel felszerelt kupakot, és tegye őket az asztalra.
- Óvatosan nyissa fel a cső zárófóliáját, nehogy kiömljön a benne lévő folyadék. Illessze a csövet a csőtartóba.
- Papírsebkendőbe egyszer fújja ki az orrát.
- Távolítsa el a vattapálcát a csomagolásból. Ügyeljen rá, hogy a vattapálcának csak a szárát érintse, a végén lévő vattapárnát ne.
- Kissé hajtsa hátra a fejét.
- A vattapálcát a vattapárnás végével előre illessze a bal orrlyukába. Lassan tolja kb. 2 cm-re előre a vattapálcát (a felső szájpadlásával párhuzamosan, ne felfelé), amíg ellenállást nem érez. Ne erőltesse.
- Forgassa meg a vattapálcát 4-szer (összesen körülbelül 15 másodpercig) úgy, hogy közben az orrüreg falának nyálkahártyájához érjen, majd távolítsa el az orrlyukából.
- Ismételje meg a 6. és 7. lépést a jobb orrlyukában ugyanazzal a vattapálcával vegyen mintát. **Megjegyzés:** Mindkét orrlyukból ugyanazzal a vattapálcával vegyen mintát.
- Helyezze a vattapálcát a csőbe olyan mélyen, hogy a vattapárna a folyadékba kerüljön. Nyomja össze a cső alsó részét, és tartsa erősen. Keverje körbe a vattapálcát több mint 10-szer, hogy a vattapárnában lévő biológiai anyag a folyadékba kerüljön.
- Vegye ki a vattapálcát, miközben összeszorítja a cső oldalait, hogy a folyadékot kiszorítsa a vattapálcából. Tegye a vattapálcát a hulladékba, és a csővéggel felszerelt kupakkal jól zárja le a csövet.

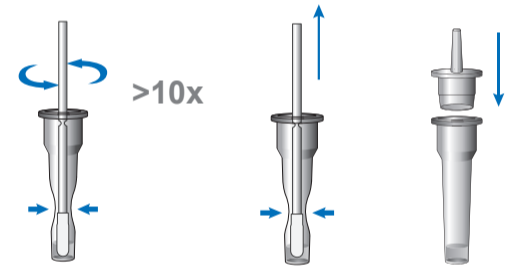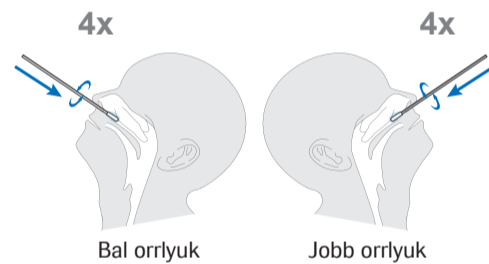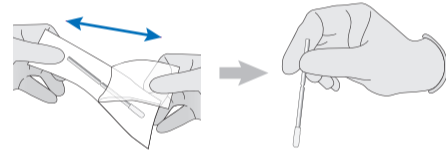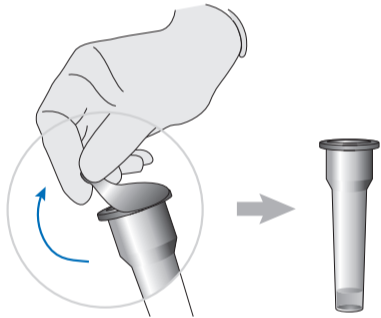

FIGYELEM! Ha nem szorítja össze a csövet, az eredmény helytelen lehet, mert túl sok puffer marad a vattapálcában.


3 Teszt végzése

- Helyezze a teszteszközt sík felületre.
- Tartsa a csövet egyenesen az alábbi képen jelölt kör alakú mélyedés (nem a téglalap alakú eredményablak) fölé.
- Tegyén pontosan 4 cseppet a kör alakú mélyedésbe. Ha szükséges, ehhez kissé nyomja össze a cső oldalait. **Megjegyzés:** Akkor is folytathatja a tesztelést, ha véletlenül 5 cseppet vitt fel a teszteszközt.
- Állítson be időzítőt, és 15–30 perc elteltével olvassa le az eredményt.
- A teszt elvégzése után mosson kezet szappanos vízzel vagy használjon kézfertőtlenítőt.

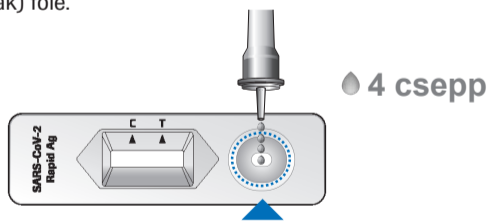

4 Az eredmények értelmezése


Érvénytelen teszteredmény

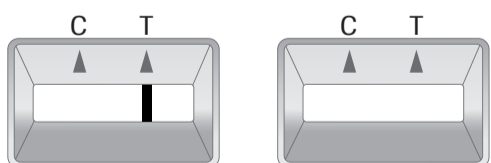

- Ha a kontrollvonal (C) nem látható, a tesztet érvénytelennek kell tekinteni. A teszt nem működik helyesen, és új tesztet kell végezni másik tesztkészlettel.

Lehet, hogy nem helyesen végezte a tesztet. Gondosan olvassa el a használati útmutatót, és ismételje meg a tesztet. Ha a teszt eredménye még mindig érvénytelen, forduljon kezelőorvosához vagy egy COVID-19-teszteléssel foglalkozó intézményhez.

Pozitív teszteredmény

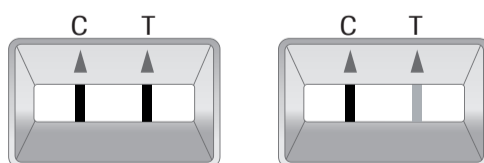


- Ha a tesztvonal (T) és a kontrollvonal (C) is látható, az eredmény pozitív.

Alaposan nézze meg az eredményt: a teszt pozitívnak tekintendő, ha két – akár halvány – vonal látható.

A pozitív teszteredmény nagy valószínűséggel COVID-19 fennállást jelenti. Azonnal forduljon kezelő- vagy háziorvosához, illetve a helyi egészségügyi hatóságokhoz, és tartsa be az elkülönítésre vonatkozó helyi szabályokat. Orvosa felkérheti, hogy PCR-teszttel erősítse meg az eredményt.

Negatív teszteredmény

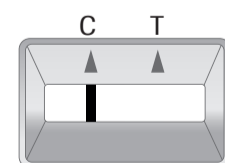

- Ha a kontrollvonal (C) látható (akármilyen halványan), és a tesztvonal (T) nem látható, az eredmény negatív. Nem valószínű, hogy fennáll a COVID-19-fertőzöttség.

A negatív teszteredmény birtokában továbbra is tartsa be az összes higiéniai és biztonsági intézkedést. Ha úgy gondolja, hogy fertőzött (mert a tünetei régóta fennállnak vagy rosszabbodnak), forduljon kezelő- vagy háziorvosához. Lehet, hogy másféle fertőzés áll fenn, vagy hogy a teszt eredménye hibás. A teszt 1-2 nap után ismételtethető, mert a COVID-19 nem mutatható ki teljes pontossággal a fertőzés minden szakaszában.