


SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test

*Professzionális felhasználásra
fejlesztett POC antigén gyorseszteszt*

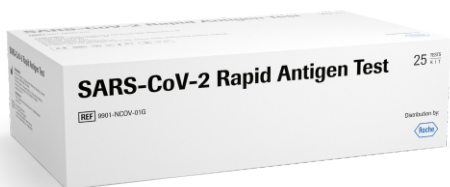

SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test

Nincs szükség készülékre

SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test

*Professzionális felhasználásra
fejlesztett POC antigén gyorseszteszt*

Termékspecifikáció:

| Teszt | Kiszereelés | Katalógusszám |
|-------------------------------|---|---------------|
| SARS-CoV-2 Rapid Antigen test | 25 teszt/doboz | 09327592190 |
| Kontroll | Kiszereelés | Katalógusszám |
| SARS-CoV-2 Antigen Control | 10 pozitív- és 10 negatív kontroll /doboz | 09338322190 |


In Vitro Diagnosztikai orvostechnikai eszköz, mely laboratóriumi és ágyemlleti környezetben történő professzionális alkalmazásra készült.

Specifititás

99,68%

Szenzitivitás

96,52%

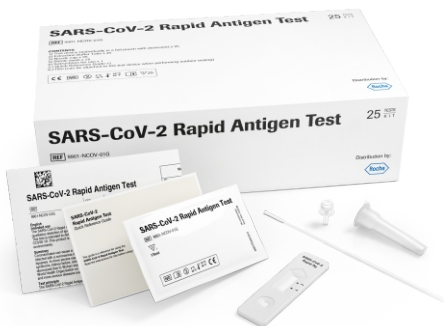

SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test

Professzionális felhasználásra fejlesztett POC antigén gyorseszteszt

- A SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test egy gyors, kromatográfiás immunkémiai vizsgálati eljárás, amely a humán orrgaratban jelen lévő SARS-CoV-2 specifikus antigének kvalitatív kimutatására használható.
- Mintatípus: orrgarati kenet.
- Nincs szükség készülékre a teszt elvégzéséhez.
- 15-30 percen belül eredmény.
- Rendkívül egyszerű használat.
- Vizsgálati eljárás célja a SARS-CoV-2 vírus-specifikus antigén kimutatása feltételezett COVID-19 betegek esetén.

1 Mintagyűjtés



Orrgarati kenetminta gyűjtéséhez helyezzenek be a beteg orryukán keresztül egy steril kenetgyűjtő pálcát olyan mélyre, hogy elérjék a garat hátsó falát.

2 Minta előkészítése



Helyezzék a pálcát a mellékelt extrakciós puffercsőbe. Szorítsák össze a puffercsövet, miközben a pálcát több mint 5-ször megforgatják.

Vegyék ki a pálcát, miközben összeszorítják a csövet, hogy kiszorítsák a pálcából a folyadékot.

A zárókupakot nyomják rá szorosan a csőre.

A mintavétel után minél előbb el kell végezni a vizsgálatot.

3 Minta felvitele



Csöppentsenek 3 csepp kivont mintát a vizsgálóeszköz mintatartójába.

4 Eredmény



15–30 min

15-30 perc múlva olvassák le a vizsgálati eredményt.


FIGYELMEZTETÉS!

30 perc eltelte után a vizsgálati eredményt már nem szabad leolvasni, téves eredményt adhat!

Teszt kiértékelése



— C — Kontrollvonal
— T — SARS-CoV-2 tesztvonal

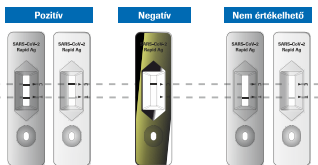

Minden esetben, ha a kontrollvonal nem jelenik meg, értékelhetetlen az eredmény.



Roche (Magyarország) Kft.
Diagnosztika Divízió
2040 Budaörs, Edison u. 1.
Tel.: 06-23-446-886
Fax: 06-23-446-890

www.roche.hu

MC-HU-00092

cobas[®]